

Italiano

Istruzioni per l'inserimento dell'acqua

Seguire la "tabella di riempimento" sottostante per la quantità di acqua da usare.

1 Attrezzo a doppio uso:
Utilizzare come chiave per togliere il tappo



Allineare la fessura ed il tappo.

Inserire la base dell'attrezzo nel tappo della valvola ed usarla come chiave per allentare il tappo. Girare l'attrezzo in senso antiorario e togliere il tappo.

2 Attrezzo a doppio uso:
Usare come imbuto per aggiungere l'acqua



Inserire l'attrezzo nell'apertura della valvola, avvitare ed utilizzare come imbuto.

3 Porre il guanciale in posizione verticale utilizzando una sedia




Riempire la sacca con una quantità misurata di acqua per raggiungere il grado di sostegno desiderato. Consultare la tabella di riempimento per i dettagli

Come rimuovere il vuoto d'aria

Dopo aver tolto l'imbuto, passare ai punti 4-7.

4



APERTURA

VUOTO D'ARIA

ACQUA

Adesso nella sacca vi è sia l'acqua che un vuoto d'aria.

Molto importante!

Per ottenere risultati migliori bisogna eliminare l'aria dalla sacca d'acqua per evitare che l'acqua si muova eccessivamente. Mantenere il guanciale dritto e seguire le istruzioni dal punto 5 al punto 7.

Avvertenza!

Se quando mettete la testa sul guanciale sentite il rumore dell'acqua, ripetete i passi dal punto 5 al 7 per eliminare eventuali bolle d'aria rimaste.

Qual'è la vostra quantità d'acqua ideale?



Misurate la corretta quantità d'acqua seguendo la "tabella di riempimento" riportata qui sotto:

TABELLA DI RIEMPIMENTO

GRADO DI SOSTEGNO	QUANTITÀ D'ACQUA
Soffice	2 litri
Medio	3 litri
Rigido	4-5 litri

Vi suggeriamo di iniziare l'uso del guanciale con un grado di sostegno medio/rigido.

TROPPO RIGIDA? - Togliete dell'acqua.
TROPPO SOFFICE? - Aggiungete dell'acqua.

Che tipo di acqua bisogna usare?

- Usare acqua del rubinetto fredda o tiepida. La temperatura dell'acqua non deve superare i 38° C.
- L'acqua può rimanere per un anno nel guanciale, poi dovrebbe essere sostituita.
- Se si usa acqua del rubinetto, non serve aggiungere alcuna sostanza chimica all'acqua.
- Se usate acqua di pozzo, potete aggiungerci qualche goccia di candeggina.

MANUTENZIONE

- Fate uscire tutta l'acqua dal guanciale.
- ☑ Stendere ad asciugare.
- ☑ Lavare a mano in acqua fredda con il tappo inserito.
- ☑ Non stirare.
- ☒ Non candeggiare.
- ☒ NON LAVARE A SECCO.

5



Spingere delicatamente con le dita il guanciale verso il basso fino a raggiungere il massimo livello dell'acqua.

6



Appiattite gentilmente la porzione rimasta della sacca con un movimento uniforme per eliminare il vuoto d'aria.

7



Rimettete il tappo, continuando ad esercitare una leggera pressione sulla parte superiore della sacca.

GARANZIA DEL FABBRICANTE

La Mediflow Inc. ("Mediflow"), per ventiquattro (24) mesi dalla data dell'acquisto (il "Periodo di garanzia"), garantisce che il guanciale provvisto di base ad acqua (il "Prodotto") ivi consegnato è privo di difetti di materiale e di fabbricazione. Secondo le condizioni espresse qui di seguito, la Mediflow si impegna a sostituire il Prodotto che in condizioni d'uso e di manutenzione normali e corrette si presenti difettoso in materiali e fabbricazione, senza alcun costo da parte dell'acquirente. La Mediflow nega espressamente qualsiasi responsabilità per danni remoti o consequenziali che derivino dall'uso del Prodotto. La responsabilità della Mediflow si limita alla sostituzione. È necessario fornire la prova d'acquisto (copia dello scontrino con il codice UPC).

Le garanzie ivi descritte non si applicano a Prodotti che sono stati usati male, maltrattati o trascurati dall'acquirente. Queste garanzie sostituiscono altre garanzie espresse od implicite, tra le quali, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità ed idoneità per scopi specifici in relazione al Prodotto. Per ricevere l'assistenza in garanzia, contattare Mediflow a www.mediflow.co.uk/contact